

Instructie decontaminatiezakken



De instructie voor het gebruik van de decontaminatiezakken staat ook op de zak zelf beschreven:

1. Open de decontaminatiezak en giet met behulp van een maatbeker de juiste hoeveelheid water in de zak (N.B.: zie beschrijving op de zak om te bepalen hoeveel water er nodig is).
2. De bevuilde instrumenten(-set) kunnen daarna in de zak geplaatst worden.
3. Haal de bescherming van de plakrand af, vouw de plakstrip om.
4. Druk plakstrip stevig aan om te voorkomen dat er water uitloopt.
5. Inhoud zo spoedig mogelijk reinigen.



Instructie voor gebruik, zie ook decontaminatiezak.



Artikelnummer 3FKFB240820
Afmeting 200 x 350 mm
Eenheid (doos) 100 stuks
11 ml water



Artikelnummer 3FKFB240822
Afmeting 420 x 430 mm
Eenheid (doos) 100 stuks
35 ml water (half DIN)



Artikelnummer 3FKFB240824
Afmeting 420 x 670 mm
Eenheid (doos) 100 stuks
70 ml water (full DIN)



Artikelnummer 3FKFB240828
Afmeting 650 x 770 mm
Eenheid (doos) 50 stuks
110 ml water (double DIN)